

Zusätzliche Informationen

Q. Wie lange dauert eine HaloRed-Sitzung?

A. 20 Minuten ist die empfohlene Sitzungsdauer.

Q. Muss ich einen Augenschutz tragen?

A. Wir empfehlen Ihnen, dies zu tun und können sie für jede Sitzung zur Verfügung stellen.

Q. Kann ich mein Telefon, meine Kopfhörer oder Ohrstöpsel im HaloRed benutzen?

A. Ja, obwohl die Kabine mit Bluetooth-Lautsprechern ausgestattet ist.

Q. Wie viele Sitzungen pro Woche werden empfohlen?

A. Zu Beginn empfehlen wir 3-5 Sitzungen pro Woche für die ersten ein bis zwei Monate, danach können Sie 2-3 Sitzungen pro Woche beibehalten.

Q. An wie vielen Sitzungen kann eine Person an einem Tag teilnehmen?

A. Es wird eine Rotlichttherapie-Sitzung pro 24 Stunden empfohlen

Q. Kann man HaloRed jeden Tag benutzen?

A. Ja.

Q. Ist die optionale Sauerstoffkomponente in einem HaloRed einer Überdruckkammer ähnlich?

A. Nein. Der HaloRed steht nicht unter Druck.

Q. Wie lange dauert es, ein HaloRed zusammenzubauen?

A. Zwei Personen können ein HaloRed in etwa 2 Stunden oder weniger

zusammenbauen. Wenn Sie auf die Videoseite unserer Website gehen, sehen Sie unten Montagevideos für alle Größen von HaloReds. [Klicken Sie hier](#), um die Videos anzusehen.

Q. Werden die Grafikdateien zur Verfügung gestellt?

A. Ja, wir können Grafikdateien ohne zusätzliche Kosten liefern, aber sie müssen von einem lokalen Grafikunternehmen auf Kosten des Käufers installiert werden.

Q. Wie oft muss der Halo-Generator gereinigt werden?

A. Wir empfehlen, den Halo-Generator mindestens einmal im Monat zu reinigen, abhängig von der Luftfeuchtigkeit an Ihrem speziellen Standort.

Q. Womit reinigen Sie das Glas und die Innenteile der Kabine und der Stühle?

A. Die Stühle und die Bereiche, die mit ihnen in Berührung kommen, wie z. B. Griffe und Knöpfe, sollten zwischen den Kunden mit einem Desinfektionstuch oder -spray mit niedriger Dosierung abgewischt werden. Um Salzpartikel von Glas zu entfernen, verwenden Sie am besten ein Swiffer Duster Kit mit verlängertem Griff oder ein Mikrofasertuch. Fingerabdrücke lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch entfernen und mit einem Papiertuch abwischen.

Q. Darf sich jemand im HaloRed aufhalten, wenn das Blaulicht-UV-Reinigungsmittel verwendet wird?

A. Nein. Dies schadet den Augen und der Haut. Niemand darf sich im HaloRed aufhalten, wenn der Blaulicht-UV-Desinfektionsautomat eingeschaltet ist.

Q. Müssen die Trainingsgeräte mit einem HaloRed verwendet werden?

A. Nein. Stühle oder Hocker können verwendet werden, wenn keine Übungsgeräte gewünscht sind.

Q. Kann HaloRed nach dem Aufbau leicht bewegt werden?

A. Jedes HaloRed wiegt Hunderte von Pfund und ist nach dem Zusammenbau nicht leicht zu bewegen.

Q. Gibt es eine Garantie für den Halo-Generator?

A. Ja. Es gibt eine lebenslange Garantie auf den Halo-Generator.

Q. Wo kann medizinisches Salz für den Halo-Generator bestellt werden?

A. Wir empfehlen, das medizinische Salz von **Sanasal**

<https://halogeneratorsalt.com/hsl/> zu bestellen.

Q. Wie funktioniert der Halo-Generator?

A. Sie können auf unsere Video-Seite auf unserer Website gehen und Sie werden ein Video sehen, wie man den Halo-Generator, der mit jedem HaloRed geliefert wird, am Ende der Video-Seite bedient.

Q. Ist die HaloRed-Struktur garantiert?

A. Ja, die HaloRed-Struktur (Glas, Scharniere, Boden, Decke, Tür usw.) hat eine Garantie von 5 Jahren.

Q. Sind die roten Leuchttafeln von der F.D.A. zugelassen?

A. Die roten Leuchtplatten sind von der F.D.A. als Medizinprodukte der Klasse 2 eingestuft.

Q. Welche Leistung haben die LED-Glühbirnen der roten Lichter?

A. Die roten LED-Leuchten sind für 50.000 Betriebsstunden ausgelegt. Das sind etwa 17 Jahre, wenn sie 8 Stunden pro Tag verwendet werden. Für die Paneele gilt eine Garantie von 3 Jahren.

Q. Welches Spektrum von rotem Licht wird in den HaloReds verwendet?

A. Ein Doppelspektrum von 660 nm (Rot) und 850 nm (NIR).

Q. Was sind einige der Vorteile der NIR-Lichttherapie?

A.

- Fördert den Stoffwechsel.
- Reichert die Mitochondrien an.
- Stimuliert die Produktion weißer Blutkörperchen.
- Reduziert das Körperfett.
- Fördert die Zellregeneration.
- Erhöht die Energie.
- Reduziert Entzündungen im Körper.
- Verbessert die Durchblutung des Körpers.

Q. Wie nah müssen Sie an den roten Leuchttafeln stehen?

A. Jedes HaloRed verfügt über genügend Rotlichtpaneele, um während der 20-minütigen Sitzung in der Kabine positive Ergebnisse zu erzielen. Die Benutzer können so nah wie 6 Zoll oder so weit weg wie mehrere Meter sein.

Q. Wie lange dauert es, bis ich ein HaloRed nach der Bestellung erhalte?

A. Die aktuelle Lieferzeit beträgt 2 Wochen.

Q. Ist dem HaloRed Salz beigefügt?

A. Die Kunden erhalten 1lb Salz in pharmazeutischer Qualität bei uns, ungefähr ein

Monatsvorrat.

Q. Wie hoch sind die Versandkosten?

A. Über Luft \$1200

Q. Kann ein HaloRed für den Heimgebrauch erworben werden?

A. Ja.

Q. Gibt es eine Schulung für die Verwendung des HaloRed?

A. Ja. Sie finden Schulungsinformationen in unserem Customer Success Portal sowie einen kostenlosen Online-Zertifizierungskurs unter [VitalityBoothCertification.com](https://www.vitalityboothcertification.com).

Q. Wie lauten die elektrischen Anforderungen für ein HaloRed?

A. Jeder HaloRed wird an eine normale 120-V-Steckdose angeschlossen. Für kleine, mittlere und große Geräte wird ein eigener 20-Ampere-Stromkreis empfohlen. Für die XL Vitality Booth ist ein 30-Ampere-Stromkreis erforderlich.

Q. Welche Innenmaße haben die einzelnen HaloRed-Modelle?

A. XL 97" x 84,5" x 80" hoch. LG 41,5" x 73,2" x 80" hoch. MD 41,5" x 57,4" x 80" hoch. SM 43,7" x 29,5" x 80" hoch.

Q. Gibt es HaloReds mit Sitzgelegenheiten?

A. Ja, ein weißer ergonomischer Stuhl (Small 1, Medium 2, Large 3 und XL 4)

Q. Wird der Vitality Booth XL mit einem Boden geliefert?

A. Im Gegensatz zu den kleinen, mittleren und großen HaloReds wird die Vitality Booth XL nicht mit einem integrierten Boden geliefert. Der Grund dafür ist, dass diese Kabinengröße am häufigsten von professionellen oder College-Sportgruppen

oder großen Fitness- oder Wellness-Zentren verwendet wird, in denen der Kunde schwere Trainingsgeräte oder spezielle Geräte im Inneren des HaloRed aufstellen möchte. Als solche kann der Kunde Gummimatten oder andere Bodenbeläge nach eigenem Ermessen hinzufügen.

Q. Ist das HaloRed ein proprietäres System?

A. Ja. Für das HaloRed sind US-Patente beim USPTO angemeldet.

Q. Wenn der optionale Sauerstoffkonzentrator bestellt wird, wie wird dieser in das HaloRed integriert?

A. Wenn Sie die Sauerstoffkonzentrator-Option bestellen, senden wir Ihnen aufgrund von Angebot und Nachfrage einen Sauerstoffkonzentrator in medizinischer Qualität, der auf den derzeit verfügbaren Geräten basiert. Alle Sauerstoffkonzentratoren weltweit verwenden den gleichen Anschlusschlauch. Alle HaloReds werden mit einem Anschlussstutzen geliefert, mit dem Sie den Sauerstoffschlauch an das HaloRed anschließen. Dann folgen Sie den Anweisungen, um das Sauerstoffgerät einzuschalten, und es pumpt Sauerstoff durch den Schlauch in das HaloRed. Ein Sauerstoffkonzentrator ist ein separates Gerät, das bis zu 30 Pfund wiegen kann.

Q. Wie wird das HaloRed-Bluetooth-Lautsprechersystem mit einem Gerät verbunden?

A. Wenn Sie nach einer Bluetooth-Verbindung suchen, sehen Sie ein Gerät, das mit dem Buchstaben B. Das ist der HaloRed. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Code 0000 ein. Das Gerät wird dann angeschlossen. Beachten Sie, dass die Lautstärke auf dem Gerät die Lautstärke auf den Lautsprechern steuert.

Q. Ist der HaloRed ein medizinisches Gerät?

A. Nein. Das HaloRed ist nicht als Medizinprodukt klassifiziert. Die roten Lichtpaneele, die im HaloRed verwendet werden, sind von der FDA als Medizinprodukt der Klasse 2 registriert, wie unter diesem [Link](#) angegeben.

Q. Gibt es ein Video, in dem die verschiedenen Komponenten des HaloRed und seine Funktionsweise gezeigt werden?

A. Ja. [Hier ist der Link](#).

Q. Gibt es ein Video über die Bedienung eines HaloRed?

A. Ja. [Hier ist der Link](#).